

Hoe gebruikt u Animé?

Animé intiem glijmiddel is heel gemakkelijk in gebruik: de benodigde hoeveelheid wordt direct op de huid of met de vingers aangebracht op het uitwendige deel van de vagina of op de penis van de man. Daar zorgt het voor snelle, langdurige bevochtiging van de huid en verzacht het vervelende irritaties.

Animé maakt het glijden soepeler, zodat het niet stroef en pijnlijk aanvoelt.

” Droogt niet op en heeft bovendien een verzorgend en helend effect op de huid.



Hoe bestel ik Animé?

Animé intiem glijmiddel is verkrijgbaar via de webshop van Memidis Pharma:

www.memidis-shop.nl

Tube met 50 ml glijmiddel

Medisch hulpmiddel CE

Prijs: € 5,95 per verpakking



Productinformatie

Ingrediënten: Animé intiem glijmiddel bevat gezuiverd water, propyleenglycol, glycerol, hydroxyethylcellulose, benzoëzuur, natriumhyaluronaat. Eigenschappen: hoge viscositeit, niet vloeïend, pH-waarde 3,8, vrij van parabenen, siliconen en dierlijke bestanddelen. Dermatologisch getest. In water oplosbaar.

Geproduceerd in Duitsland



Memidis Pharma Benelux
Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen
tel. +31 (0)24 64 55 411
info@memidis.nl

Meer informatie op
www.memidis-shop.nl

Animé *intiem glijmiddel*

Mild, verzorgend glijmiddel met vochtinbrengende werking



Animé *intiem glijmiddel*

Animé

intiem glijmiddel

Animé is een nieuw glijmiddel op waterbasis met hyaluronzuur. Hierdoor heeft Animé de juiste zuurgraad en is het extreem zacht voor de huid.

Animé, het nieuwe glijmiddel met sterk verbeterde, prettige eigenschappen.


Blijft langer glijden, is glad en droogt niet op	✓
Op waterbasis	✓
Geur- en kleurloos, vlekt niet	✓
Vrij van parabenen en siliconen	✓
Dermatologisch getest	✓
Verzorgend, verlichtend bij irritatie	✓
De juiste pH (zuurgraad)	✓
Zacht en heel mild voor de huid	✓
Veilig te gebruiken met condooms (latex, polyurethaan en polyisopreen)	✓

Geschikt voor haar en hem

Animé is een nieuw glijmiddel op waterbasis met sterk verbeterde, prettige eigenschappen. Door de samenstelling met hyaluronzuur is Animé mild, hydraterend, helpt het bij genezen van wondjes en heeft het een verzorgend effect op de huid.

Het middel laat geen vlekken achter. Animé is bovendien in water oplosbaar, kleur- en reukloos en vrij van parabenen en siliconen.

Veilig toe te passen met condooms van natuurlijk latex, polyurethaan en polyisopreen en met hulpmiddelen en producten voor de seksuele stimulatie. Animé is voor uitwendig gebruik.

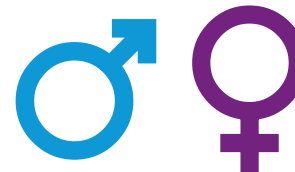

Waarom een glijmiddel met hyaluronzuur?

Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof, die voorkomt in onze huid en in ons bind-, zenuw- en epitheelweefsel. Het geeft deze weefsels en onze organen hun vorm, zorgt voor elasticiteit en hydrateert tegelijkertijd. Hyaluronzuur kan zesduizend keer het eigen volume aan water opnemen. Daarom is het heel belangrijk voor de vochtregulatie van ons weefsel.

Het opbrengen van hyaluronzuur houdt de huid stevig en elastisch, ook en vooral het vaginale bindweefsel. Verder ondersteund hyaluronzuur het herstellend vermogen van de huid. Het verzacht vervelend branden en jeuken en vermindert

het ontstaan van infecties. Allergieën in verband met hyaluronzuur zijn tot op heden niet bekend.



Animé wordt snel door de huid opgenomen.

Zwanger worden? Gebruik een vruchtbaarheidsvriendelijk glijmiddel

Wist je dat de meeste vaginale glijmiddelen zeer schadelijk zijn voor het sperma. Stellen met een kindervens zouden deze dan ook niet moeten gebruiken.

Gebruik Animé dus niet tijdens de ovulatie. Wil je zwanger worden? Dan adviseren wij om in deze fase het glijmiddel **Prefert**® te gebruiken. Dit geeft een uitstekende vaginale bevochtiging zonder de kwaliteit van het sperma aan te tasten. Prefert is verkrijgbaar via www.memidis-shop.nl

