


# NormaTest™ Bijsluiter

## Gebruiksaanwijzing en testprocedure


1. Neem een NormaTest™ staafje uit de verpakking.
2. Maak de folieverpakking van het NormaTest™ staafje open. Als het staafje beschadigd is of het uiteinde is verkleurd dan moet u het weggooien en een nieuw staafje pakken.
3. Zorg ervoor dat het uiteinde van het staafje nergens mee in contact komt voordat het in de vagina wordt gebracht.




4. Houd het NormaTest™ staafje tussen duim en wijsvinger alleen vast ter hoogte van de ronde handgreep.

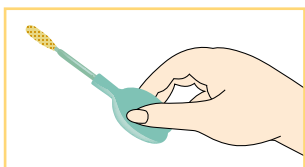

5. Spreid met uw vingers de schaamlippen rond de opening van de vagina zodat deze zichtbaar wordt.

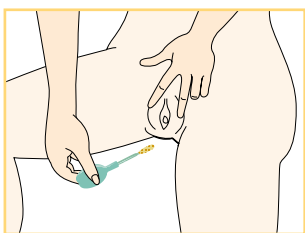


6. Schuif het gele uiteinde van de NormaTest™ in de vagina tot aan de ronde handgreep of tot uw vingers tegen de huid rond de vagina komen (ongeveer 5 cm diep) en roteer het staafje enkele malen. Raak de ingang van de vagina niet aan.

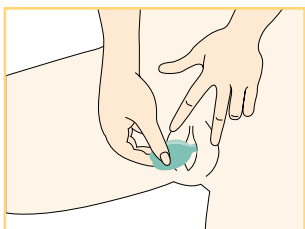

7. Neem de NormaTest™ uit de vagina. Zorg ervoor dat het uiteinde nergens tegen aan komt en controleer of er een zichtbare hoeveelheid afscheiding aan het uiteinde zit.
8. Wacht 10 seconden. Kijk dan of het uiteinde van de NormaTest™ van kleur veranderd is (van geel in blauw of groen). Let op: als er bloed op de NormaTest™ aanwezig is moet de testuitslag worden genegeerd.
9. Gooi de NormaTest™ na gebruik weg zoals andere producten voor vrouwelijke hygiëne.

## Beoordeling van het resultaat

### Positieve uitslag

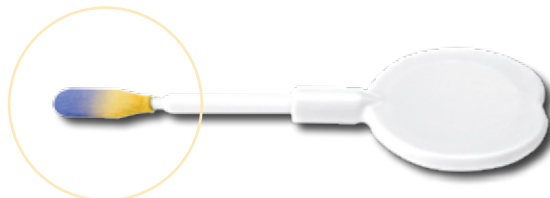


Als het uiteinde na 10 seconden blauw of groen verkleurt, dan is de kans groot dat er sprake is van een bacteriële of parasitaire infectie. Als het gele uiteinde gedeeltelijk blauw of groen verkleurt moet dat worden beschouwd als een positieve uitslag.

**Belangrijk: Als u zwanger bent en het uiteinde verkleurt blauw of groen, dan kan dat wijzen op lekkage van vruchtwater.**

### Doorgeven van de uitslag aan uw huisarts

Een positieve uitslag moet worden doorgegeven aan uw huisarts.

### Negatieve uitslag

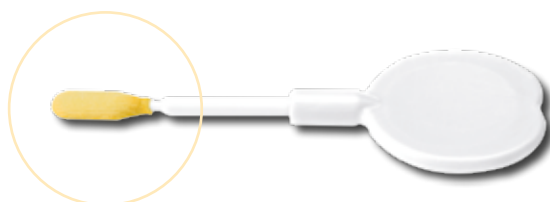

Als het uiteinde na 10 seconden niet verkleurt, dan is de kans op het hebben van een bacteriële of parasitaire infectie klein.

### Herhalen van de test

Als u niet zeker bent dat het uiteinde vaginale afscheiding bevat, moet de test worden herhaald. Als tijdens een van de twee tests een blauwe of groene verkleuring van het uiteinde zichtbaar is, is de kans op het hebben van een bacteriële of parasitaire infectie groot.

### Bewaren en houdbaarheid

Bewaar de verpakking bij kamertemperatuur op een droge plaats. Let op de vervaldatum die op elke verpakking is vermeld.